



Geeignete Lichthärtegeräte für die Polymerisation von SHOFU Verblendkompositen

Hersteller	Lichthärtegerät	SHOFU Universal Pre-Opaque	SHOFU Universal Opaque	Ceramage Vorhärtung	Ceramage Endhärtung	Ceramage UP Vorhärtung	Ceramage UP Endhärtung
Bredent Group	Power Unit 2 LED	60 Sek.	180 Sek.	60 Sek.	180 Sek.	60 Sek.	180 Sek.
Dentsply Sirona	Eclipse Junior	90 Sek.	180 Sek.	90 Sek.	300 Sek.	60 Sek.	300 Sek.
GC Europe	Labolight DUO	1,5 Min.	3 Min.	-	-	1,5 Min.	5 Min.
GC Europe	Labolight LV-III	2 Min.	3 Min.	2 Min.	5 Min.	2 Min.	5 Min.
Kulzer GmbH	HiLite Power / 3D	90 Sek.	180 Sek.	90 Sek.	180 Sek.	90 Sek.	180 Sek.
Kulzer GmbH	Heraflash	90 Sek.	180 Sek.	90 Sek.	180 Sek.	90 Sek.	180 Sek.
Kulzer GmbH	Uni XS/ XS	90 Sek.	180 Sek.	90 Sek.	180 Sek.	90 Sek.	180 Sek.
SHOFU DENTAL GmbH	Solidilite LED	30 Sek.	90 Sek.	30 Sek.	90 Sek.	30 Sek.	90 Sek.
SHOFU DENTAL GmbH	Solidilite V	1 Min.	3 Min.	1 Min.	3 Min.	1 Min.	3 Min.
SHOFU DENTAL GmbH	Solidilite EX	1 Min.	3 Min.	1 Min.	5 Min.	1 Min.	5 Min.

Nicht aufgeführte Geräte sind nicht geeignet oder nicht validiert. Bei Anfragen zu anderen, systemfremden Lichthärtegeräten wenden Sie sich bitte an den Customer Service unter customerservice@shofu.de.

SHOFU DENTAL GmbH 06/2024