



## Enceintes de photopolymérisation compatibles avec la polymérisation des composites de restauration SHOFU

Fabricant	Enceinte	SHOFU Universal	SHOFU Universal	Ceramage		Ceramage UP	
		Pre-Opaque	Opaque	Prépolymérisation	Polymérisation finale	Prépolymérisation	Polymérisation finale
Bredent Group	Power Unit 2 LED	60 sec.	180 sec.	60 sec.	180 sec.	60 sec.	180 sec.
Dentsply Sirona	Eclipse Junior	90 sec.	180 sec.	90 sec.	300 sec.	60 sec.	300 sec.
GC Europe	Labolight DUO	1,5 min.	3 min.	-	-	1,5 min.	5 min.
GC Europe	Labolight LV-III	2 min.	3 min.	2 min.	5 min.	2 min.	5 min.
Kulzer GmbH	HiLite Power / 3D	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.
Kulzer GmbH	Heraflash	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.
Kulzer GmbH	Uni XS/ XS	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.	90 sec.	180 sec.
SHOFU DENTAL GmbH	Solidilite LED	30 sec.	90 sec.	30 sec.	90 sec.	30 sec.	90 sec.
SHOFU DENTAL GmbH	Solidilite V	1 min.	3 min.	1 min.	3 min.	1 min.	3 min.
SHOFU DENTAL GmbH	Solidilite EX	1 min.	3 min.	1 min.	5 min.	1 min.	5 min.

Les enceintes non listées sont incompatibles ou non testées. Pour toute autre enceinte, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse [customerservice@shofu.de](mailto:customerservice@shofu.de).

SHOFU DENTAL GmbH 06/2024